

Përdorimi i AED Manager

70-00974-46 A

E drejta e autorit © 2014 Cardiac Science Corporation. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Përmbajtja

◆ Rreth AED Manager	2
◆ Caktimi i preferencave të aplikacionit AED Manager	4
◆ Shqyrtimi i shpëtimit	13
◆ Administrimi i AED-ve	18



AT THE HEART OF SAVING
LIVES[®]

Rreth AED Manager

AED Manager ndihmon drejtuesit, administruesit e defibrilatorit të jashtëm automatik (AED) dhe teknikët e urgjencës mjekësore në konfigurimin e AED-ve Powerheart® G5 dhe shqyrtimin e rasteve të viktimave me arrest të befasishtëm kardiak.

Me AED Manager, mund të...	Shihni faqen...
Zgjidhni njoftimet zanore dhe vizuale të RescueCoach™ sipas nevojave të trajnimit dhe gjuhës së një përdoruesi të zakonshëm*	faqja 8
Personalizoni shumë aspekte të protokollit të shpëtimit - për shembull, gjatësitë dhe llojet e CPR-ve dhe kushtet e goditjes*	faqja 8
Shqyrtoni rastet e shpëtimit, duke përfshirë EKG-në e pacientit	faqja 13
Personalizoni dhe shtojuni të dhënave informacione specifike të rastit dhe të pacientit sipas të dhënave që regjistrohen nga AED	faqja 16
Shfaqni vetëtestimin dhe mesazhe të tjera të ngjarjeve për çdo AED	faqja 17
Eksportoni të dhënat e ruajtura demografike dhe të shpëtimit për përdorim në aplikacione të tjera	faqja 18
Printoni dhe ruani raporte në PDF	faqja 18
Konfiguroni AED në distancë*	faqja 19

Shënim: *Çdo cilësim shpëtimi duhet përcaktuar vetëm nga personeli i autorizuar dhe i trajnuar mjekësor.

Pamje e përgjithshme e dritares së AED Manager

Lista e AED-ve

Lista e AED-ve

1 Lidhur
2 I palidhur
3 A00000000000 (←)
A00000000001 (←)

AED TË DHËNA

4 Modeli i AED G5007
5 Nr. i serisë i AED A00000000000
Numri i shpëtimeve 0
Versioni i softuerit 4.23
Versioni i harduerit 1
Versioni i gjuhës bazë en-US 0.0
Versioni i gjuhës tjetër no-NO 0.0

BATERIA TË DHËNA

Modeli i baterisë ACCMNTHLY
Raportuar së fundi 92.0%
Niveli i baterisë
Data e instalimit 1/1/2011

CILËSIMET E GODITJES

E njëjta energji pas konvertimit Aktiv
Goditjet maksimale Për sekuençë 1
Protokolli i energjisë për goditje 200VE 300VE 300VE
Shpejtësia VF/VT 160 BPM
Shpejtësia SVT Pa terapi

I RRRITUR 200VE 300VE 300VE
PEDIATRIK 50VE 67VE 67VE

CILËSIMET E PËRGJITHSHME

Identifikimi i AED
Gjuha kryesore Gjuha bazë
Niveli i përgjithshëm i njoftimit i AED Avancuar
Niveli i volumit Ulët
Përpara CPR Joaktiv
Njoftimi i nisjes Telefono 911

CILËSIMET E CPR

Lloji i seancës CPR e zakonshme
Afati i CPR 0 sek
Njoftimi i metronomit CPR Shtyp
Shpejtësia e metronomit CPR 100 për min
Përfundo seancën kur Setet mbaruan
Numri i seteve 5
Frymëmarrjet për set 2

I RRRITUR CPR e zakonshme
PEDIATRIK CPR e zakonshme

0 sek
Shtyp
100 për min
Setet mbaruan
5
2

Lista e AED-ve

- 1 Shtypni shigjetën për të fshehur ose shfaqur listën e AED-ve.
- 2 Kutia e kërkimit. Shkruani emrin ose numrin e serisë së AED-së për t'u shfaqur në listë.
- 3 Lista e AED-ve që mund të kenë qenë ose që janë ende të lidhura me kompjuterin. Zgjidhni një AED për t'i parë informacionin përkatës.
 - Shtypni + për të shfaqur listën e AED-ve të lidhura ose të shkëputura. Kur lista të zgjerohet, shtypni - për ta fshehur.

Skedat e konfigurimit dhe të informacionit të AED-ve

- 4 Informacion i përgjithshëm rreth AED-ve, duke përfshirë emrin, llojin dhe gjendjen e baterisë. Konfiguroni këtu cilësimet e AED-së.
- 5 Shfaqni mesazhet e ruajtura nga AED-ja.
- 6 Shfaqni regjistrimet e sesioneve të shpëtimit.

Përdorimi i AED Manager

AED Manager mund të përdoret në Windows XP®, Windows Vista® dhe Windows 7®. Duhet të identifikoheni në Windows, ose si administrator, ose si përdorues normal. AED Manager nuk mund ta përdorni i identifikuar si vizitor.

Për ta hapur AED Manager:



1. Shtypni dy herë ikonën **AED Manager** në ekranin kryesor të kompjuterit.
2. Pasi të shfaqet dritarja prezantuese, zgjidhni ose **Administrator** ose **Përdorues normal**. Duhet të jepni fjalëkalimin nëse zgjidhni **Administrator**.
 - Llogaria **Administrator** mundëson jo vetëm t'i shikoni informacionet e AED-së, por edhe t'i ndryshoni dhe përditësoni cilësimet.

E rëndësishme: Hyrja në nivel administratori duhet të kufizohet deri në ata persona që kanë trajnim mjekësor dhe autoritetin për të bërë ndryshime në protokollet e shpëtimit ose cilësimet të tjera terapie me AED.

 - Llogaria **Përdorues normal** mundëson vetëm shfaqjen, eksportimin dhe printimin e informacioneve të AED-së.
3. Shtypni **Vijo**.

Caktimi i preferencave të aplikacionit AED Manager

Zgjidhni **Cilësimet | Preferencat**.

Në panelin **Të përgjithshme**, caktoni këto preferenca:

- ◆ **Gjuha:** Gjuha në të cilën do të përdoret AED Manager.
Shënim: Rinisni AED Manager për të aktivizuar zgjedhjen e gjuhës.
- ◆ **Fjalëkalimi:** Nëse e keni nisur AED Manager si Administrator, duhet të shtypni **Ndrysho fjalëkalimin** për të përditësuar fjalëkalimin e Administratorit.

Në panelin **Eksporto**, zgjidhni një dosje për të ruajtur eksportimet e të dhënave të shpëtimit. Për të zgjedhur një dosje, shtypni **Shfleto**, në vijim kaloni në dosjen që dëshironi të përdorni.

Transferimi i të dhënave AED drejt AED Manager

Mund të transferosh të dhënat e shpëtimit dhe të ngjarjeve me njësi USB Flash nga një ose më shumë AED, ose drejtpërdrejt me kabllo USB nga një AED drejt *AED Manager*. Mund dhe të përdorësh njësi Flash për të rikonfiguruar AED-të atje ku mbahen, në vend që t'i transportoni njësitë në kompjuter.



VINI RE! Goditje elektrike dhe rrezik zjarri.

Mos lidhni telefona ose fisha të paautorizuara në folenë e kësaj pajisjeje.



KUJDES. Humbje e mundshme e të dhënave.

Mos e hiqni njësinë Flash ose mos e shkëputni AED-në kur transferohen të dhënat.

Të dhënat mund të humbasin ose të dëmtohen.

Njësia USB Flash -

Shënim: Për qëndrueshmëri më të mirë të transferimit të të dhënave, përdorni një nga këto marka të njësive Flash: Lexar JumpDrive, SanDisk Cruzer ose HP.

1. Shkëputni vatat e defibrilimit.



2. Lidhni njësinë Flash në folenë USB.

- AED kopjon informacionin në njësinë Flash.
- Kur mbaron, AED njofton për heqjen e njësive Flash.



3. Hiqni njësinë Flash.



4. Lidhni vatat në AED dhe mbyllni kapakun.

5. Kopjoni të dhënat e shpëtimit të AED-së nga njësia Flash tek *AED Manager*.



Për të shfaqur të dhënat

- ◆ Lidhni njësinë Flash në folenë USB në kompjuter. Nëse hapet dritare Windows Explorer, mbylleni.

Çdo AED që ka të dhëna në njësi shfaqet në listën AED nën zërin "E palidhur". Për të shfaqur, printuar dhe eksportuar të dhënat sikur të kishit lidhur AED.

Kabllloja USB -


1. Shkëputni vatat e defibrilimit.



2. Lidhni kabllon USB në folenë USB.



3. Lidhni skajin tjetër në folenë USB të kompjuterit. Nëse hapet dritare Windows Explorer, mbylleni.

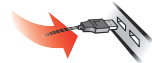

4. Nisni *AED Manager*.

- AED shfaq "Modaliteti i komunikimit".
- AED-ja shfaqet në listën e AED-ve dhe të dhënat kopjohen në databazën e AED Manager.



5. Shkëputni kabllon USB

Pasi ta shkëputni AED-në, ikona e saj lëviz nga **Lidhur** në **E palidhur** në listën e AED-ve.



6. Lidhni vatat.



Konfigurimi i AED-së dhe parametrat e shpëtimit

E rëndësishme: Duhet të keni privilegje administratori për të ndryshuar parametrat e shpëtimit. Kur hapni AED Manager, identifikohuni si administrator. Nëse keni hyrë si përdorues, dilni dhe rihapeni.

Për të shfaqur konfigurimin aktual të një AED-je, shtypini ikonën ose emrin në listën e AED-ve.

Nën skedën **Përmbledhje**, mund të personalizoni një sërë karakteristikash të çdo AED-je në inventarin tuaj. Panelet në dritaren Përmbledhje caktojnë funksione të ndryshme të AED-së:

Cilësimet e përgjithshme	Njoftimet për gjuhën dhe shpëtimin	faqja 8
Cilësimet e orës	Data dhe ora në orën e AED-së	faqja 9
Cilësimet e goditjes	Kufijtë për dhënien e terapisë	faqja 9
Cilësimet e CPR-së	Protokollet e CPR-së për terapi për të rritur dhe pediatrike	faqja 11
Cilësimet e pajisjes CPR	Kufijtë për njoftimet e CPR-së kur me AED-në lidhen vata për të rritur, me asistencë të pajisjes CPR.	faqja 12

Pasi të mbaroni konfigurimin e parametrave, shtypni **Ruaj konfigurimin** ose ikonën **Ruaje në AED** në shiritin e veglave. AED Manager i dërgon konfigurimin AED-së së lidhur.

Për të rikthyer të gjitha cilësimet e konfigurimit në të gjitha skedat e konfigurimit në vlerat e tyre fillestare që nga ruajtja e fundit, shtypni ikonën **Zhbëj të gjitha ndryshimet** në shiritin e veglave.

Për të rikthyer cilësimet e AED-së në vlerat e fabrikës, shtypni **Rivendos vlerat e fabrikës** dhe ruajeni.

Cilësimet e përgjithshme: Caktimi i gjuhës dhe i njoftimeve

Përdorni panelin **CILËSIMET E PËRGJITHSHME** për të caktuar këto preferenca.

Preferenca	Përshkrimi
Identifikimi i AED-së	<p>Emri i AED-së siç shfaqet në listën e AED-ve dhe në raporte. Emri mund të jetë deri në 16 germa i gjatë. Përdorni një nga germat e mëposhtme: A-Z, a-z, 0-9, vizë, hapësirë.</p> <p>Nëse menaxhoni më shumë se një AED, zgjidhni një konvencion emërtimi, si p.sh. sipas vendndodhjes së njësive.</p>
Gjuha kryesore (Vetëm për modelet dygjuhëshe)	Zgjidhni gjuhën që përdor AED-ja kur hapet kapaku. Gjatë shpëtimit përdoruesi mund të kalojë në gjuhët e tjera të listuara.
Niveli i përgjithshëm i njoftimit i AED	<p>Bazë, Standard ose I përparuar</p> <p>Shihni <i>Manualin e përdorimit për Powerheart G5</i> për përshkrimet dhe njoftimet e përdorura në secilin nivel.</p>
Niveli i volumit	<p>I ulët - Përdoreni për zyra ose zona të tjera të qeta.</p> <p>Maksimal - Përdoreni për zona të jashtme ose të zhurmshme.</p>
Përpara CPR-së	<p>AED-ja mund të nisë shpëtimin ose duke analizuar EKG-në e pacientit, ose duke udhëzuar shpëtuesin të nisë CPR-në.</p> <p>Aktiv - AED-ja jep njoftime për kryerjen e CPR-së përpara.</p> <p>Joaktiv - AED-ja analizon EKG-në e pacientit përpara.</p>
Njoftimi i nisjes	<p>AED-ja jep një njoftim fillestar kur hapet kapaku.</p> <p>Pa njoftim: AED-ja nuk luan njoftim të nisjes.</p> <p>Përndryshe zgjidhni një nga këto njoftime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefona 911 (Telefona 000 për Australinë) • Telefona shërbimet e urgjencës!

Cilësimet e orës: Cakto orën

Për të caktuar orën e AED-së:

1. Zgjidhni brezin orar ku ndodheni nga menyja **Brezi orar/Shmangia UTC**.
2. Shtypni **Sinkronizo datën/orën**.

Ora e AED-së do të përditësohet në orën e kompjuterit kur të shtypni **Ruaj konfigurimin**.

Shënim: Orët e shfaqura në AED Manager nuk rregullohen për orën verore.

Cilësimet e goditjes: Cakto kufijtë e zbulimit të ritmit

Për të caktuar parametrat e zbulimit të ritmit, përdorni preferencat në panelin **CILËSIMET E GODITJES**.

AED-ja mund të mbajë protokolle të ndryshme për vata për të rritur dhe pediatrike.

Preferenca	Përshkrimi
E njëjta energji pas konvertimit	Kur aktivizohet, AED-ja dërgon energjinë e defibrilimit të mëparshëm herën tjetër që kërkohet goditje nëse ritmi i pacientit bëhet i pagoditshëm.
Maksimumi i goditjeve për sekuençë	Numri i goditjeve që mund të bëhen përpara se AED-ja të kalojë në modalitet CPR.
Protokolli i energjisë për goditje	Zgjidhni protokollin për energjinë e dhënë me goditje. Nëse AED-ja ka të lidhur vata pediatrike defibrilimi, ajo përdor numrin në fushën Pediatrike.
Shpejtësia VF/VT	Shpejtësia minimale e zemrës në cilën AED-ja zbulon fibrilim ventrikular dhe përcakton se ritmi është i goditshëm. Nëse AED-ja ka të lidhur vata pediatrike defibrilimi, ajo përdor numrin në fushën Pediatrike.

Preferenca	Përshkrimi
Shpejtësia SVT	<p>Shton diferencim për SVT (takikardi supraventrikulare) në vendimin për goditshmëri/pagoditshmëri. Nëse AED-ja ka të lidhur vata pediatrike defibrilimi, ajo përdor numrin në fushën Pediatrike.</p> <p>FIKUR (pa monitorim për SVT):</p> <ul style="list-style-type: none">• Shpejtësitë e zembrës nën shpejtësinë VF/VT nuk janë kurrë të goditshme• Shpejtësitë e zembrës mbi shpejtësinë VF/VT janë gjithnjë të goditshme <p>Pa terapi (monitorim për SVT, por dhënia e terapisë varet nga sa më poshtë):</p> <ul style="list-style-type: none">• Shpejtësitë e zembrës nën shpejtësinë VF/VT nuk janë kurrë të goditshme• Shpejtësitë e zembrës mbi shpejtësinë VF/VT janë gjithmonë të klasifikuara si të goditshme ose të pagoditshme në varësi të morfologjive të grafikëve të tyre të valëve. <p>160-300:</p> <ul style="list-style-type: none">• Shpejtësitë e zembrës nën shpejtësinë VF/VT nuk janë kurrë të goditshme• Shpejtësitë e zembrës mbi shpejtësinë e caktuar SVT janë gjithnjë të goditshme• Shpejtësitë e zembrës mbi shpejtësinë VF/VT dhe shpejtësinë e caktuar SVT janë gjithmonë të klasifikuara si të goditshme ose të pagoditshme në varësi të morfologjive të grafikëve të tyre të valëve.

Cilësimet e CPR-së: Cakto parametrat e shpëtimit

AED-ja mund të ofrojë protokolle të ndryshme shpëtimi për të rritur dhe për fëmijë (pediatrike).

Preferenca	Përshkrimi
Lloji i seancës	CPR e zakonshme (masazhe kardiake dhe frymëmarrje artificiale) dhe Vetëm masazhet përdorin të njëjtat cilësime. Vetëm masazhet përdor vetëm cilësimet e afatit të CPR dhe të metronomit.
Afati i CPR-së	Kohëzgjatja, në sekonda, që zgjat çdo seancë CPR. Kohëmatësi mbrapsht në AED mban kohën e mbetur.
Njoftimi i metronomit CPR	Shënon ritmin që duhet të mbajë shpëtuesi për masazhet kardiake. Shtyp - Njoftim zanor i "shtypjes" që jepet në shpejtësinë e zgjedhur të metronomit CPR. Sinjali - AED lëshon një tingull mekanik të metronomit në shpejtësinë e metronomit CPR. Pa metronom - Pa zë
Shpejtësia e metronomit CPR	Ritmi i njoftimit të metronomit në rrahje në minutë.
Përfundo seancën kur	Kjo preferencë përcakton kohën gjithsej të një seance. Setet përfunduan - Seanca e CPR-së përfundon kur skadon numri i seteve CPR. Çdo set përfshin numrin e masazheve kardiake për set dhe numrin e frymëmarrjeve artificiale për set. Mbarimi i kohës - Seanca përfundon kur kohëmatësi i CPR-së kap zeron. Seti përfundimtar i masazheve kardiake dhe i frymëmarrjeve artificiale mund të ketë përfunduar pjesërisht.
Numri i seteve	Nëse përdorni CPR të zakonshme, numri i herëve që shpëtuesi njoftohet për kryerjen e kombinimit të masazheve dhe të frymëmarrjeve.
Frymëmarrjet për set	Numri i frymëmarrjeve që duhen dhënë përpara nisjes së një cikli të ri masazhesh.
Masazhe për set	Numri i masazheve që duhen dhënë përpara frymëmarrjeve.

Cilësimet e pajisjes CPR: Cakto kufijtë e pajisjes CPR

Për të caktuar kufijtë për njoftimin nga CPR për shpëtime që përdorin pajisjen CPR, modifikoni preferencat në panelin **CILËSIMET E CAD**.

Preferenca	Përshkrimi
Shpejtësia e masazheve (masazhe/minutë)	Minimumi: Nëse shpëtuesi i kryen masazhet me këtë shpejtësi, AED-ja njofton: "Shtyp më shpejt". Maksimumi: Nëse shpëtuesi i kryen masazhet mbi këtë shpejtësi, AED-ja njofton: "Shtyp më ngadalë".
Thellësia e masazhit (cm)	Minimumi: Nëse shpëtuesi nuk e arrin këtë thellësi masazhimi, AED-ja njofton: "Shtyp më fort". Maksimumi: Nëse shpëtuesi shtyp më thellë se kaq, AED-ja njofton: "Shtyp më lehtë".

Shqyrtimi i shpëtimit

Skeda **Përmbledhje** nën skedën **Shpëtimit** tregon kohën, numrin e goditjeve të dhëna të defibrilimit dhe kohëzgjatjen e shpëtimit.

Qendra e shpëtimit	Përmbledhje	Foto e AED
--------------------	-------------	------------

Përmbledhje e shpëtimit

Të dhëna të incidentit

Kodi i incidentit	87_7920_87
Data/Ora	9/14/2014 9:44:54 PM (+-)Ora verore
Numri i goditjeve	0
Kohëzgjatja e shpëtimit	166 sekonda

Shfaq skedën **Foto e AED** për të parë të gjitha cilësimet me të cilat ishte programuar AED në kohën e shpëtimit. Shfaqni [Konfigurimi i AED-së dhe parametrat e shpëtimit](#) në faqen 2-7 për përshkrimet e cilësimeve.





Shfaqja e grafikut të valëve të EKG-së dhe e ngjarjeve të shpëtimit

Shtypni skedën **Grafiku i valëve dhe ngjarjet** nën skedën **Qendra e shpëtimit**.

Lista e ngjarjeve shfaq të gjitha veprimet e AED-së që kjo kryen gjatë shpëtimit.

Grafiku nën listën e ngjarjeve tregon një regjistrim të EKG-së dhe CPR-së së pacientit me ndihmën e pajisjes CPR me ngjarjet e shpëtimit.

- ◆ Zgjidhni një artikull në listën e ngjarjeve.
Grafiku kalon në pikën e shpëtimit ku ndodhi ngjarja.
- ◆ Tërhiqni dhe lëshoni mausin mbi grafikun e valëve për të lëvizur përpara dhe mbrapa në kohë.
- ◆ Shtoni shënime në grafikun e valëve. Shtypni me të djathtën në skemën ku dëshironi të shfaqet shënimi. Nga menyuja kontekstuale, zgjidhni Shto shënim të përdoruesit. Në dritaren **Krijo/Modifiko ngjarje** shkruaj emrin dhe komentin, dhe shtyp **Ruaj**.
- ◆ Përdorni komandat e luajtësit për të riluajtur shpëtimin në kohë reale (një sekondë e shpëtimit zgjat një sekondë gjatë luajtjes) dhe kaloni përpara dhe mbrapa nëpër grafikun e valëve dhe në shpëtim.

	Lëvizni një faqe pas	<input type="text" value="Opsionet"/>	Zgjidhni artikujt për shqyrtim: shfaqni grafikun CPR, shfaqni kohën konkrete në listën e ngjarjeve, shfaqni ngjarjet e shtuara nga përdoruesit, shfaqni shënuesit e ngjarjeve
	Lëvizni pas një sekondë	<input type="text" value="10"/> mm/mV	Caktoni shkallën vertikale të grafikut EKG (5-25 mm/mV)
	Luani regjistrimin	<input type="text" value="25"/> mm/sek	Caktoni shkallën horizontale të grafikëve EKG dhe CPR (10-40 mm/sekondë)
	Ndaloni luajtjen	<input type="text" value="2"/> mm/g	Caktoni shkallën vertikale të grafikut CPR (1-3 mm/g; g = m/sek)



Lëvizni përpara një sekondë



Shtypni për të hapur skedën e grafikut të valëve në dritare të veçantë. Këtë dritare mund ta maksimizoni për ta parë regjistrimin në ekran të plotë.



Lëvizni përpara një faqe



Tërhiqeni treguesin lart për të zmadhuar ose zvogëluar pamjen. Shtypni një lupë për të zmadhuar me nga një hap.



Printoni grafikun e valëve të shpëtimit



Tërhiqeni treguesin e pozicionit majtas dhe djathtas për të parë pjesë të ndryshme të shpëtimit.

Shfaqja dhe përditësimi i të dhënave të incidentit

Shtypni skedën **Shpëtimet**. Zgjidhni shpëtimin për t'u parë. Shtypni skedën **Incidenti**. Përdorni formularin e incidentit për të shtuar të dhëna demografike rreth pacientit dhe informacione të përgjithshme rreth shpëtimit.

AED-ja nuk e ka të domosdoshme të lidhet për modifikuar apo ruajtur këtë informacion.

Për të plotësuar formularin:

1. Shkruani ose zgjidhni të dhënat nga menyte vertikale për përditësim ose shtim.
2. Pasi të mbaroni, shtypni **Ruaj në bazën e të dhënave**.

Printimi i të dhënave të incidentit dhe i grafikëve të valëve të shpëtimit

Mund të printoni informacionin e shfaqur në skedat **Incidenti** dhe **Grafiku i valëve**.

Për të printuar vetëm grafikun e valëve:



- ◆ Shtypni ikonën **Printo** në skedën **Shpëtimet | Grafiku i valëve dhe ngjarjet** në shiritin e ikonave.

Për të printuar informacione të grafikut të valëve, ngjarjeve të shpëtimit dhe të incidenteve:

1. Shtypni me të djathtë një shpëtim në listën e shpëtimeve.
2. Zgjidhni **Printo raportin e shpëtimit**.
3. Zgjidhni informacionin për printim.
4. Shtypni **Printo**.

Shqyrtimi i mesazheve të ngjarjeve

Mund të shihni detaje rreth ngjarjeve dhe gabimeve të AED në skedën **Evidenca e ngjarjeve**. AED-ja regjistron kohën kur ndodhin veprime të ndryshme, si p.sh. vetëtestimet e sistemit dhe hapja ose mbyllja e kapakut.

1) Evidenca e ngjarjeve:

Liston të gjitha vetëtestimet e regjistruara nga AED-ja.

2) Gabimet aktuale:

Liston të gjitha gabimet e krijuara nga AED-ja.

Evidenca e ngjarjeve			
Ora	Lloji i ngj...	Të dhëna zë...	
4/26/2011 7:46:54 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për
4/26/2011 7:47:02 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Çdo ditë Pë
4/26/2011 7:47:39 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për
4/26/2011 7:48:13 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për
4/26/2011 7:48:40 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Fikja Përfu
4/26/2011 7:46:54 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për
4/26/2011 7:47:06 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Çdo ditë Pë
4/26/2011 7:47:42 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për
4/26/2011 7:48:16 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për
4/26/2011 7:48:43 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Fikja Përfu
4/26/2011 7:46:54 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për
4/26/2011 7:47:02 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Çdo ditë Pë
4/26/2011 7:47:39 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë (+)Ora verore	Vetëtestim	Ndezja Për

Gabimet aktuale	
Ora	Kodi i ...
4/30/2011 1:16:27 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë 0x60B04
4/30/2011 1:14:05 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë 0x60B01
4/30/2011 12:43:44 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë 0x50505
4/30/2011 12:43:43 PM (GMT+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bernë, Romë, Stokholm, Vjenë 0x50231

Administrimi i AED-ve

Me AED të lidhur, mund të shqyrtoni vetëtestimet, të printoni konfigurimin, të importoni dhe eksportoni të dhëna të AED-së dhe t'i përditësoni firmuerin.

Printimi i informacionit të AED-së

1. Zgjidhni një AED nga lista e AED-ve. Nuk është e nevojshme të jetë e lidhur.
2. Zgjidhni **Skedari | Krijo raport | Printo raportin AED**.

Importimi dhe eksportimi i të dhënave AED

Nëse ke ruajtur më parë skedar të dhënash AED, mund ta ngarkosh për shfaqje në AED Manager.

Për të importuar skedar të dhënash AED:

1. Zgjidhni **Skedari | Importo**.
2. Zgjidhni një skedar për importim.

AED e importuar shfaqet në listën e AED-ve të palidhura.

Të gjithë grupin e të dhënave të AED-ve mund ta eksportoni në format të ngjeshur skedarësh. Ky skedar mund të përdoret me aplikacione të tjera për analizë të mëtejshme.

Për të eksportuar të dhëna të AED-së:

1. Zgjidhni AED-në për ta eksportuar nga lista e të lidhurave ose e të palidhurave.
2. Zgjidhni menynë **Skedari, zgjidhni Eksporto | Të dhënat e zgjedhura AED në skedar njësh**.

Të gjitha shpëtimit, duke përfshirë grafikun e valëve EKG dhe ngjarjet e regjistruara të shpëtimit, ruhen në një skedar të vetëm të kompresuar.

Konfigurimi i AED-ve në distancë (vetëm për nivelin e administratorit)

Konfigurimin e AED-ve mund ta përditësoni në pozicionet përkatëse, pa qenë nevoja t'i sillni te kompjuteri ku ndodhet *AED Manager*. Me anë të një njësie USB Flash, mund të konfiguroni të gjithë inventarin e AED-ve. Përditësoni çdonjërin AED në pozicionin përkatës duke futur njësinë Flash në folenë USB të AED-së. Kur futni njësinë Flash, AED-ja kopjon parametrat e konfigurimit që keni zgjedhur.

Për të përditësuar AED-të në distancë me një konfigurim të ri:

1. Zgjidhni një AED nga secila prej listave të të lidhurave ose të të palidhurave. Mund të zgjidhni cilëndo AED.
Shënim: Duhet të zgjidhni një AED, pasi nevojitet konfigurimi i saj për të përgatitur njësinë Flash.
2. Lidhni një njësi USB Flash në kompjuter.
3. Zgjidhni **Skedari | Përgatit njësinë USB Flash**.
4. Në dritaren që shfaqet për përgatitjen e njësisë USB Flash, zgjidhni njësinë në fjalë. **KUJDES!** Formatimi fshin të gjitha të dhënat nga njësia Flash.
5. Shtypni **Tjetër** për të formatuar (përgatitur) njësinë Flash.
6. Në dritaren e konfigurimit, zgjidhni parametrat që dëshironi.
Panelet në dritaren e konfigurimit janë të ngjashme me ato në skedën **Përmbledhje**.
7. Shqyrtoni konfigurimin.
Shtypni **Ruaj** nëse ndryshimet përfunduan.
Pasi të shtypni **Ruaj**, AED Manager i shkruan skedarët e konfigurimit në njësinë USB Flash.
8. Hiqni njësinë Flash nga foleja USB.

Përditësimi i softuerit AED (vetëm për nivelin e administratorit)

Periodikisht, mund të ketë softuerë të rinj që kanë qarkulluar për AED-në.

Për të përditësuar softuerin:

1. Lidhni AED-në me kompjuterin. (Softueri nuk mund të përditësohet me një njësi Flash.)
2. Identifikohu në *AED Manager* si administrator.
AED-ja shfaqet nën **E lidhur** në listën e AED-ve.
3. Zgjidhni AED-në.
4. Futni CD-në e përditësuar në kompjuter.
5. Zgjidhni **Skedari | Përditëso softuerin AED**.
6. Shtypni **Përditëso**.

Kujdes: Pajisja u bë e papërdorshme.

Mbajeni AED-në të lidhur gjatë ngarkimit të firmuerit. AED-ja mund të bëhet e papërdorshme nëse shkëputet përpara se të përfundojë ngarkimi.

Kur të përfundojë përditësimi, do të shihni mesazhin **Përditësimi përfundoi**. Tani mund ta shkëputësh AED-në në mënyrë të sigurt.

Cardiac Science Corporation • N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA • 262.953.3500 • Nr. i telefonit pa pagesë për SHBA:
800.426.0337 • Faks: 262.953.3499 • care@cardiacscience.com

Mbështetja teknike• (SHBA) Faks: 262.798.5236 • techsupport@cardiacscience.com • (Ndërkombëtare) internationalservice@cardiacscience.com

Cardiac Science, logoja e zemrës me mburojë, Powerheart, STAR, Intellisense, Rescue Ready, RescueCoach dhe RHYTHMx janë marka tregtare të Cardiac Science Corporation. E drejta e autorit © 2014 Cardiac Science Corporation. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



70-00974-46 A

