


إجراء عملية إنقاذ

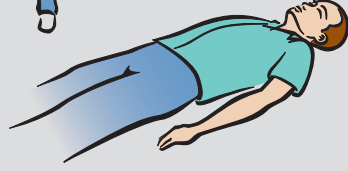

أحضِر مزيل الرجفان
الخارجي التلقائي (AED).



اتصل بخدمات الطوارئ!



هل يستجيب المريض؟



وصل الوساتين.



اخلع ملابس المريض.
اكتشف الصدر.



ضع مزيل الرجفان الخارجي
التلقائي (AED) على الأرض.
افتح الغطاء.



ضع جهاز إنعاش القلب
والرئتين إذا كان موجودًا.



حسب التعليمات،
اضغط على الزر الأحمر الواض.



لا تلمس المريض.

مزيل الرجفان الخارجي شبه التلقائي



تعد Cardiac Science وشعار Shielded Heart علامات تجارية
مملوكة لشركة Cardiac Science Corporation.
حقوق النشر والطبع © 2019 جميع الحقوق محفوظة.
Wisconsin 53531 Deerfield · 500 Burdick Parkway
الولايات المتحدة الأمريكية
www.cardiacscience.com




70-01972-06 A



خدمة سلامة الأجهزة الطبية -
شركة ذات مسؤولية محدودة
Schiffgraben 41
D-30175 هانوفر
ألمانيا



حسب التعليمات، أعطِ المريض
مجموعة من الأنفاس.

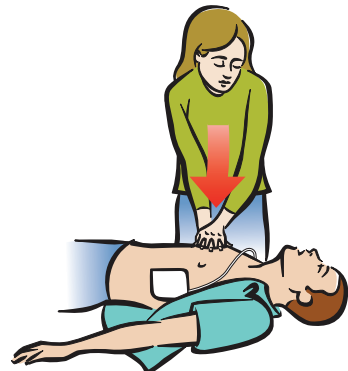

اتبع مطالبات مزيل الرجفان الخارجي
التلقائي. أعطِ المريض مجموعة من
الضغطات على الصدر.