


إجراء عملية إنقاذ

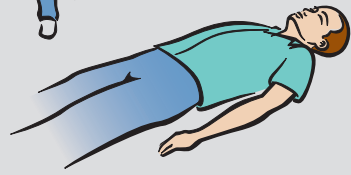

أحضر مزيل الرجفان الخارجي التلقائي (AED).



اتصل بخدمات الطوارئ!



هل يستجيب المريض؟



وصل الوساتين.



اخلع ملابس المريض. اكتشف الصدر.



ضع مزيل الرجفان الخارجي التلقائي (AED) على الأرض. افتح الغطاء.



ضع جهاز إنعاش القلب والرئتين إذا كان موجودًا.



عند الضرورة، سيعطي مزيل الرجفان الخارجي التلقائي صدمة تلقائيًا.



لا تلمس المريض.

مزيل الرجفان الخارجي التلقائي



تعد Cardiac Science وشعار Shielded Heart علامات تجارية مملوكة لشركة Cardiac Science Corporation. حقوق النشر والطبع © 2019 جميع الحقوق محفوظة. Wisconsin 53531 • Deerfield • 500 Burdick Parkway الولايات المتحدة الأمريكية www.cardiacscience.com




70-02001-06 A



خدمة سلامة الأجهزة الطبية - شركة ذات مسؤولية محدودة Schiffgraben 41 D-30175 هانوفر ألمانيا



حسب التعليمات، أعطِ المريض مجموعة من الأنفاس.

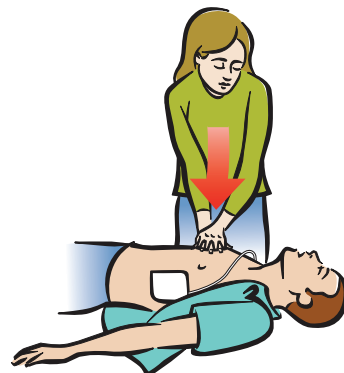

اتبع مطالبات مزيل الرجفان الخارجي التلقائي. أعطِ المريض مجموعة من الضغوطات على الصدر.